

Sehr geehrte Eltern,

dieses Dokument soll Sie bei der Durchführung der Einzeltestung auf SARS-CoV-2 Ihres Kindes unterstützen. Das Dokument **verbleibt bei Ihnen** und enthält auch den **Testcode**, der benötigt wird, um das Ergebnis der Untersuchung abzurufen.

Anleitung zur Testdurchführung

WICHTIG: Dieses Dokument verbleibt bei den Eltern!



1) Testset-Tüte öffnen und den gesamten Inhalt herausnehmen



WICHTIG!
Bitte leserlich in
Druckbuchstaben
ausfüllen!

2) Untersuchungsformular bitte vollständig ausfüllen. Probenröhrchen mit Namen beschriften.




Die Testset-Tüte mit Falzverschluss enthält

- **Anleitung zur Probennahme** (Vorderseite) und **Befundabruf** (Rückseite), voretikettiert
- **Untersuchungsformular**, voretikettiert
- **Probenröhrchen**, voretikettiert

Die Tüte wird am Schluss für den Rücktransport von Probe und Untersuchungsformular zum Labor genutzt.



Aufbau des Probenröhrchens

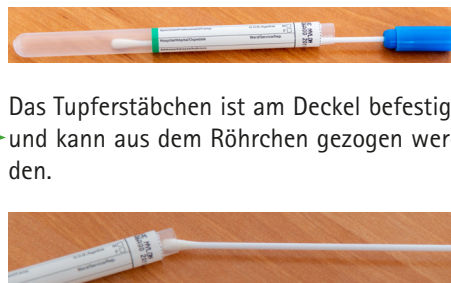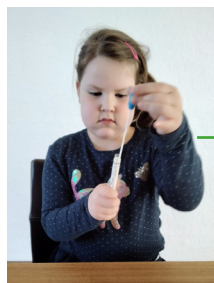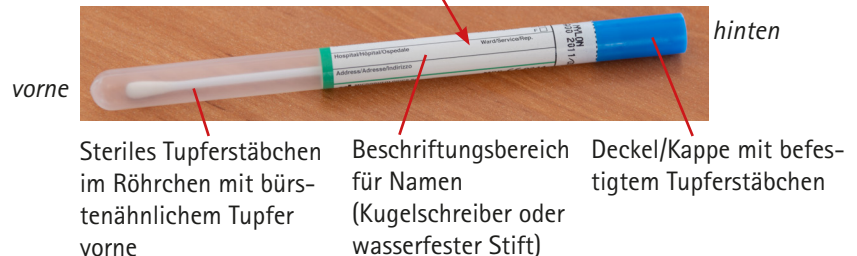

Das Tupferstäbchen ist am Deckel befestigt und kann aus dem Röhrchen gezogen werden.

3) Probenröhrchen öffnen:
Röhrchen fest in die Hand nehmen und mit der anderen Hand vorsichtig am Deckel/an der Kappe drehen und ziehen.

→ Stets hinten am Deckel anfassen!
Der büstenähnliche Tüpfel vorne soll nicht berührt werden!



4) Vorderes Tupfer-/Bürstenende in den Mund nehmen und ausgiebig lutschen (30 Sekunden). Der Tupfer sollte anschließend mit Speichel durchtränkt sein.



5) Tupferstäbchen wieder zurück in das Probenröhrchen stecken bis der Deckel wieder dicht und fest das Röhrchen verschließt.

Beschriftung des Röhrchens und Angaben im Untersuchungsformular nochmals prüfen.



S
C
H
U
L
E → L
A
B
O
R

6) Probenröhrchen und Untersuchungsformular in die Transporttüte geben und verschließen.
Bitte über die Schule zum Labor versenden. FERTIG!

WICHTIG: Dieses Dokument verbleibt bei den Eltern!

Sehr geehrte Eltern,

die Versandtüte mit der Probe und dem Untersuchungsformular kann über die Schule an das Labor übersandt werden. Bitte informieren Sie sich über den morgendlichen Abgabezeitpunkt und Abgabeort bei der Schule Ihres Kindes, um einen taggleichen Transport sicherzustellen.

Die vom Land NRW geplante und organisierte Logistik sieht vor, dass die Proben am Nachmittag unser Labor in Dortmund erreichen. Es erfolgt dann eine zügige und priorisierte Bearbeitung der von Ihnen eingesandten Probe.

Die Ergebnisse stehen im Regelfall vor Unterrichtsbeginn am Folgetag zur Verfügung.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Möglichkeiten vor, um das Testergebnis online abzurufen. Bitte bewahren Sie daher dieses Dokument mit den notwendigen Codes zum Abruf der Testergebnisse gut auf.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie vor allem Gesundheit!

*Das Laborteam des Medizinischen Versorgungszentrums
Dr. Eberhard & Partner Dortmund*

**WICHTIG: Dieses Dokument
verbleibt bei den Eltern!
Bitte gut aufbewahren!**

*Hilfe zum Befundabruf:
0231 / 9572-7699*

*Hilfe zur Durchführung der
Einzeltestung:
0231 / 9572-6299*



Corona-Testergebnis online

a) Corona-Warn-App

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit der Corona-Warn-App.

Das Testergebnis wird im Rahmen der Testungen für Schulen in der Regel bis zum Morgen des folgenden Schultages verfügbar gemacht.

*Scannen Sie mit der
Corona-Warn-App!*




b) PC / Web-Browser

Öffnen Sie

<https://befund.labmed.de/>

in Ihrem Web-Browser.

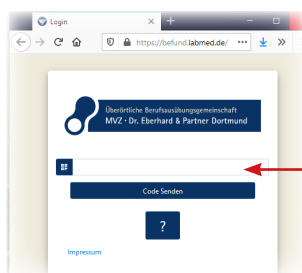

Geben Sie Ihren COVID-19-Test-Code ein.



c) Smartphone

Falls Sie die Corona-Warn-App nicht nutzen, können Sie Ihr Testergebnis mit unten stehendem QR-Code abrufen.

Das Testergebnis wird im Rahmen der Testungen für Schulen in der Regel bis zum Morgen des folgenden Schultages verfügbar gemacht.

Bei modernen Smartphones genügt es, die Kamera-App auf den QR-Code zu richten. Ansonsten wird ggf. eine zusätzliche QR-Scan-App benötigt.

Scannen Sie diesen Code!

